


# GUÍA RÁPIDA

## Monitor de Presión Arterial de Inflación Manual

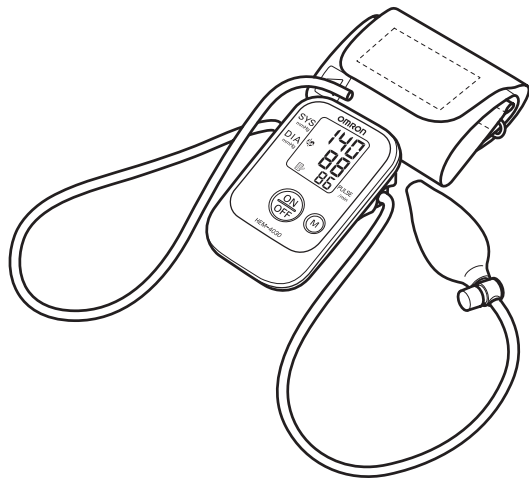


Modelo HEM-4030  
5328956-2A


### PASO 1

#### Colocación de pilas y tubo de brazalete

Coloque 2 pilas 1.5V "AAA" en la parte inferior de la unidad.

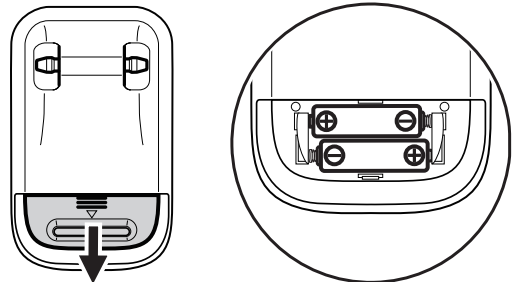

Coloque los tubos de aire en el enchufe de aire.

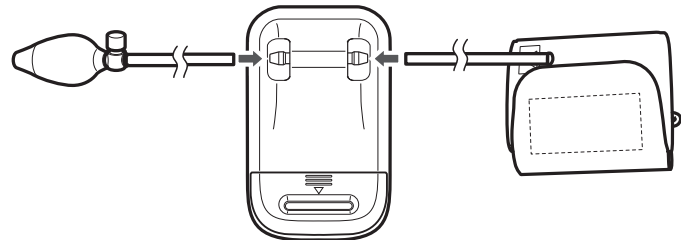


### PASO 2

#### Colocación del brazalete


Coloque el brazalete directamente sobre la piel en la parte superior del brazo izquierdo. La parte inferior del brazalete debe quedar 1/2" (pulgada) (1 - 2 cm) sobre el codo.

Coloque el brazalete de manera que la flecha ▼ quede centrada en la parte interna de su brazo con el tubo apuntando hacia su mano (hacia abajo). Ajuste el brazalete de manera cómoda.

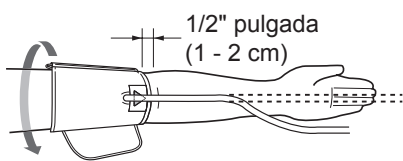

Para utilizar el brazo derecho, consulte el manual de instrucciones.



Siéntese en una silla con los pies apoyados sobre el piso. Coloque el brazo en una mesa de modo que el brazalete quede en el mismo nivel que su corazón.

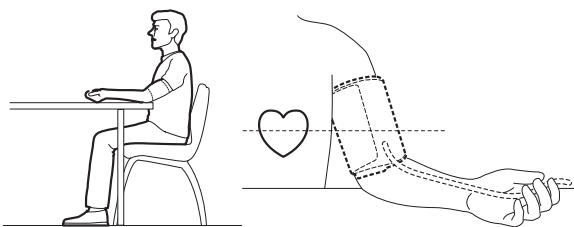

### PASO 3

#### Iniciar medición

Presione el botón de liberación de aire para liberar el aire que pudiera haber dentro del brazalete, luego, presione el botón ON/OFF para encender la unidad.

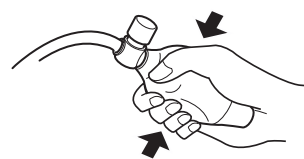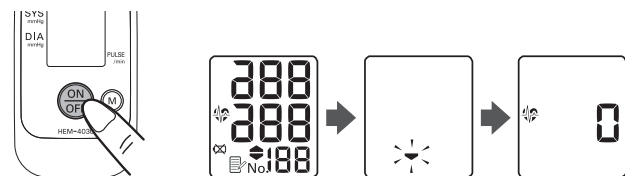

Infle el brazalete hasta que llegue a 30 ó 40 mmHg por encima del valor de su presión sistólica prevista.