

# OMRON®

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

# MINITERMÓMETRO DE OÍDO

Modelo **MC-510INT**



Português

Español

# TABLA DE CONTENIDOS

Introducción .....	3
Nombres de las piezas .....	4
Conversión entre °C y °F .....	4
Antes de usar .....	5
Instrucciones de uso y memoria .....	5
Cuidado y mantenimiento .....	6
Recambio de la batería .....	6
Especificaciones .....	7
Diagnóstico y resolución de problemas .....	8, 9
Advertencia .....	10
Garantía .....	11
Referencia Rápida .....	12

# INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar el minitermómetro de oído Omron®.

Este termómetro de oído permite conocer la temperatura del conducto auditivo de manera rápida, precisa y segura. Este termómetro detecta el calor infrarrojo proveniente del tímpano del oído (membrana timpánica).

Ya no necesitará preocuparse de que pueda romperse el vidrio ni por los riesgos del mercurio.

La temperatura del oído no cambia al hablar, comer o beber, mientras que estas actividades sí afectan la temperatura oral.

Este termómetro convierte el calor medido a la temperatura equivalente en un segundo.

Niños y adultos pueden usar la unidad sin dificultades. Se puede medir la temperatura de un niño incluso mientras duerme.

Le recomendamos que practique cómo tomar la temperatura con el minitermómetro de oído Omron® a cada miembro de la familia cuando estén sanos. Así conocerá la técnica que deberá utilizar al emplear el termómetro de oído cuando alguno de ellos esté enfermo.


Si tiene alguna duda respecto del significado de alguna temperatura específica, consulte a su médico.

*Este producto está diseñado sólo para ser utilizado en el hogar.*

Lea este manual de instrucciones en su totalidad y con atención antes de emplear su minitermómetro de oído Omron®.

## Guarde Estas Instrucciones


## NOMBRES DE LAS PIEZAS

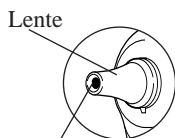

Sonda



Fundas  
para la lente

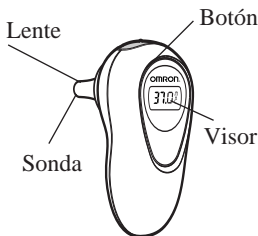

Estuche (contiene 10 fundas para la lente, además del protector adicional provisto con el termómetro)

## CONVERSIÓN ENTRE GRADOS CENTÍGRADOS Y GRADOS FAHRENHEIT (°C/°F)

- Según la configuración original de este termómetro, las temperaturas obtenidas se visualizan en grados centígrados (°C)
- Si desea cambiar la escala de medición de grados centígrados (°C) a grados Fahrenheit (°F), siga los pasos indicados a continuación:

### Atención:

Al cambiar la escala de medición de "°C" a "°F" o de "°F" a "°C", se borran los valores medidos previamente.

- 1) Asegúrese de que la unidad esté apagada (pantalla en blanco).
  - 2) Presione el botón y manténgalo presionado durante 3 segundos hasta que el indicador "°C" titile y se escuche una señal auditiva breve.
  - 3) Presione nuevamente el botón; ahora titilará el indicador "°F".
  - 4) Después de cinco (5) segundos, la unidad se apagará.
- La nueva escala queda así fijada.
  - Repita el proceso para invertir la escala de medición, si así lo desea.


# ANTES DE USAR

- El termómetro no funcionará a menos que el protector de la lente esté colocado en forma correcta.
- Por razones de higiene, coloque un nuevo protector cada vez que use la unidad.


## RECAMBIO DE LA FUNDAS PARA LA LENTE

Use el protector de lente Omron® (modelo MC-505LCINT)

- 1) Quite la funda para la lente.
- 2) Coloque una nueva funda para la lente.

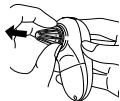

Inserte la funda para la lente hasta que escuche un clic.

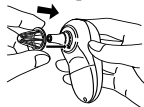

# INSTRUCCIONES DE USO Y MEMORIA

- (1) Presione el botón para encender la unidad (El visor se alumbrará por 2 segundos).

## **Función de memoria:**

- (2) El valor medido previamente aparecerá en el visor (Memoria).  
En el caso de la segunda medición y de las siguientes, cada valor medido previamente aparece acompañado del símbolo "M" (memoria) en el visor.

## **Nota:**

Al emplear la unidad por primera vez, no aparece el símbolo "M" en el visor.

- (3) Cuando el símbolo "°F" o "°C" titile, introduzca la lente en el oído. Tire el lóbulo de la oreja suavemente hacia atrás antes de insertar el termómetro; de este modo obtendrá mejores resultados.
- (4) Espere hasta escuchar la señal acústica que indica que el dispositivo está listo (una señal acústica breve); aparecerá un símbolo "O" que indica el valor medido. Esto significa que el ángulo es correcto y que la unidad está lista para realizar la medición.
- (5) Presione nuevamente el botón (mientras la unidad se encuentra colocada en el oído). Cuando escuche 4 señales acústicas breves se habrá completado la medición.
- (6) Retire la sonda del oído.
- (7) Descarte la funda empleado para la lente y reemplácelo por uno nuevo, de manera que la unidad esté lista para ser utilizada nuevamente.
- (8) Si desea repetir la medición, espere hasta que el símbolo "°F" o "°C" titile.


## **Nota:**

- Puede realizar hasta tres mediciones consecutivas. Si desea realizar más de tres mediciones, espere diez minutos y luego proceda a medir nuevamente. (Esto se debe a que la medida obtenida puede no ser exacta como consecuencia del calentamiento de la sonda por el calor del cuerpo).
- El termómetro se apagará automáticamente alrededor de 1 minuto después de medir la temperatura. No hay ningún botón para apagar la unidad manualmente.

# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

## • Procedimiento para la limpieza de la unidad

- Limpie la cubierta de la unidad con un paño suave y seco o con alcohol.
- Cuando la lente esté sucia, emplee solamente un paño suave y seco o hisopos de algodón.
- No limpie ninguna de las piezas de la unidad con detergente, diluyente o benceno.
- No la sumerja en agua.

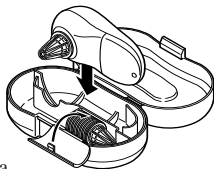


## • Procedimiento para guardar el termómetro

- Una vez colocado la funda para la lente, mantenga su termómetro en el estuche.
- Guarde su termómetro en un lugar que no reciba la luz directa del sol, que no esté sometido a temperaturas o humedad extremas y donde no se vea afectado por vibraciones, polvo o choques.

# RECAMBIO DE LA BATERÍA

- (1) Emplee una batería de litio CR2032.
- (2) Quite el tornillo y la tapa del compartimiento de la batería.
- (3) Retire la batería usada. No emplee un destornillador ni pinzas de metal para extraer la batería.
- (4) Coloque la batería nueva con el lado positivo (+) hacia arriba. .
- (5) Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de la batería y ajuste el tornillo.

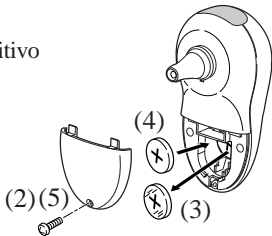




**Nota:** Siga las disposiciones locales al descartar cualquier batería usada.

# ESPECIFICACIONES

Nombre:	Minitermómetro de oído instantáneo Omron®
Modelo:	MC-510INT
Alimentación:	Batería de litio CR2032 de 3 voltios CC
Duración de la batería:	Aproximadamente 5000 mediciones
Sensor:	Thermopila
Indicación de temperatura:	Con 4 cifras, cada 0.1°C ó °F
Exactitud:	34.0 a 35.9°C (93.2 a 96.7°F) : ±0.3°C (±0.5°F) 36.0 a 39.0°C (96.8 a 102.2°F) : ±0.2°C (±0.4°F) 39.1 a 42.2°C (102.3 a 108.0°F) :±0.3°C (±0.5°F)
Espectro de medición:	34 a 42.2°C (93.2 a 108°F)
Peso:	Aproximadamente 50 g (1.8 onza) (incluyendo la batería)
Temperatura / de funcionamiento:	Temperatura ambiente; 10 a 40°C (50 a 104°F)
Humedad:	Humedad relativa: 30 a 85%
Temperatura / de almacenamiento:	Temperatura ambiente; -20 a 60°C (-4 a 140°F)
Humedad:	Humedad relativa: 10 a 95%
Memoria:	Muestra en pantalla la última medición realizada
Accesorios:	Estuche, manual de instrucciones, protectores de lente, (un total de 11: 10 piezas en el estuche más 1 en la unidad).
Opciones:	Funda de la lente que emplea la serie el modelo MC-505LCINT de Omron




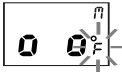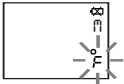


Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

# DIAGNÓSTICO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Visor	Significado	Solución
Nada aparece en la pantalla, aun después de encender la unidad.	Batería descargada	Recambie la batería.
	Los polos de la batería (+ y -) están dispuestos de manera incorrecta.	Coloque la batería de manera que los polos estén en la posición adecuada.
Los símbolos "°F" o "°C" titilan, pero el símbolo "0" NO aparece en el visor.	La funda para la lente puede estar sucio.	Recambie el la funda para la lente por uno nuevo.
	La lente puede estar sucia.	Limpie la lente con un hisopo de algodón.
	El tímpano del oído puede estar tapado con cera.	Extraiga la cera del oído con un hisopo de algodón.
 <p>El símbolo "0 0" aparece en el visor.</p>	La unidad está funcionando en un ambiente de temperatura elevada; por lo tanto es necesario realizar una operación especial.	Coloque la unidad en el oído, espere 2 segundos. Presione el botón y espere hasta escuchar 4 señales acústicas breves. Retire el termómetro del oído y observe los resultados.
 <p>Después de que se iluminen todos los símbolos en el visor, aparecerá una marca .</p>	Pila con carga insuficiente.	Cambie la pila.
La luz de la pantalla no se ilumina.	Pila con carga insuficiente.	Cambie la pila.

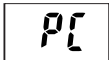
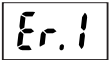
# DIAGNÓSTICO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Visor	Significado	Solución
	La funda para la lente no está en la sonda.	Fije la funda para la lente; luego realice la medición.
	La temperatura de la unidad es inestable.	Asegúrese de que la unidad se encuentre a la temperatura del ambiente donde se habrá de realizar la medición. Deje que transcurran 30 minutos para que la temperatura se establezca antes de usar la unidad.
	La temperatura de la unidad es de 10°C (50°F) o inferior, es decir fuera del espectro de operación.	
	La temperatura de la unidad es de 40°C (104°F) o superior, es decir fuera del espectro de operación.	Espectro normal: 10°C a 40°C (50°F a 104°F)
	Puede ser necesario someter la unidad a una reparación.	Encienda la unidad nuevamente. Si aparece la indicación "Er.1" nuevamente, puede que sea necesario reparar la unidad. Contactar al distribuidor autorizado.
	La temperatura medida está por encima del espectro de medición del termómetro.	-Puede que la sonda no haya sido colocada correctamente dentro del oído. La sonda debe ajustarse perfectamente en la abertura del oído.
	La temperatura medida está por debajo del espectro de medición del termómetro.	-Asegúrese de que el protector de la lente esté limpio y que el conducto auditivo no se encuentre obstruido con cera.

# ADVERTENCIA

- Este termómetro debe utilizarse únicamente en el oído humano.
- Sólo emplee la funda para la lente correspondiente a su unidad específica.
- Por razones de higiene, **NO** comparta la funda para la lente.
- Recambie la funda para la lente cuando éste se vea afectado por la cera del oído u otros líquidos corporales.
- Trate la lente con cuidado. Si no se usa de manera adecuada, se afectará la exactitud de la medición de la temperatura.
- Mantenga la unidad alejada de los niños.
- Use su unidad a temperatura ambiente. Las temperaturas ambientales extremas pueden afectar la exactitud de las mediciones.
- Cuando sea posible, guarde la unidad a temperatura ambiente. Mantenga el termómetro a temperatura ambiente durante al menos 30 minutos antes de usarlo.
- Si siente dolor al usar la unidad, quítela del oído .
- **NO** use el termómetro cuando el oído se encuentre infectado.
- **NO** lo use después de nadar o bañarse ya que esto puede dañar el tejido del oído y afectar también la exactitud de la medición de la temperatura.
- **NO** lo use cerca de un teléfono portátil.
- **NO** lo desarme, repare ni cambie ninguna pieza de la unidad en ningún momento.
- **NO** humedezca la unidad ni vierta líquido sobre ninguna de sus piezas.

## GARANTÍA DE 2 AÑOS LIMITADA

Su minitermómetro de oído marca Omron® está garantizado para estar libre de los defectos de producción por un período de 2 años bajo uso normal.

Esta garantía extiende solamente comprador al por menor original. Si algun reparo sea necesario dentro del plazo de la garantía, por favor comuníquese con el distribuidor autorizado en su país.

La garantía antes mencionada es completa y exclusiva. El que asigna la garantía expreso niega el defecto por daños fortuitos, especiales o consecuentes de cualquier naturaleza.

Cualquier garantía implicada que se presente por la operación de la ley será limitada en la duración al término de esta garantía. (Algunos estados no permiten limitaciones en cuánto tiempo una garantía implicada dura, así que la limitación antedicha puede no aplicarse a usted.)

Esta garantía le da los derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varíen de país a país.

## REFERENCIA RÁPIDA

- Oprima el botón  
oprimir el botón hace iluminar la luz posterior de pantalla por 2 segundos, por lo que se puede ver el resultado rápidamente.
- Introduzca la unidad en el oído
- Espere hasta escuchar una señal acústica breve
- Oprima nuevamente el botón; espere hasta escuchar 4 señales acústicas breves
- Retire la unidad del oído:  
lea los resultados
- Espere 10 minutos antes de realizar la cuarta medición

Fabricado por:

**OMRON HEALTHCARE, INC.**

300 Lakeview Parkway

Vernon Hills, Illinois 60061

USA

[www.omronhealthcare.com](http://www.omronhealthcare.com)

510INTINST Rev A

# OMRON®

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

# MINI-TERMÔMETRO DE OUVIDO

Modelo **MC-510INT**



Português

# TABLA DE CONTENIDO

Introdução .....	3
Nomes das peças .....	4
Conversão °C/°F .....	4
Antes de usar el dispositivo .....	5
Instruções de uso e para a memória .....	5
Cuidados e manutenção .....	6
Substituição da bateria .....	6
Especificações .....	7
Solução de problemas .....	8, 9
Alerta .....	10
Garantia .....	11
Guia de consulta rápida .....	12

# INTRODUÇÃO

Obrigado por adquirir o Omron® Mini Ear Thermometer.

Este termômetro de ouvido oferece leituras de temperatura seguras, precisas e rápidas, a partir do canal auricular.

Este termômetro lê o calor infravermelho do tímpano (membrana timpânica).

Não é necessário se preocupar com instrumentos de vidro quebráveis ou com os perigos associados ao mercúrio.

A temperatura do ouvido não é afetada por fala, alimentação ou bebidas.

Esses fatores afetam a temperatura oral.

Em um segundo, ele transforma o calor mensurado em uma temperatura equivalente.

A unidade é fácil de usar, tanto em crianças, quanto em adultos.

As temperaturas podem ser obtidas em crianças enquanto dormem.

Recomendamos que se pratique a obtenção de temperaturas com o Omron® Mini Ear Thermometer em todos os membros da família, quando estão todos bem.

Desse modo, haverá confiança na técnica quando se utilizar o termômetro de ouvido em uma pessoa adoentada.


Entre em contato com o seu médico se houver quaisquer perguntas relacionadas com temperaturas específicas.

*Este produto é destinado apenas para uso doméstico.*

Leia este manual de instruções totalmente antes de usar o seu Omron® Mini Ear Thermometer.

## Guarde Estas Instruções

## NOMES DAS PEÇAS

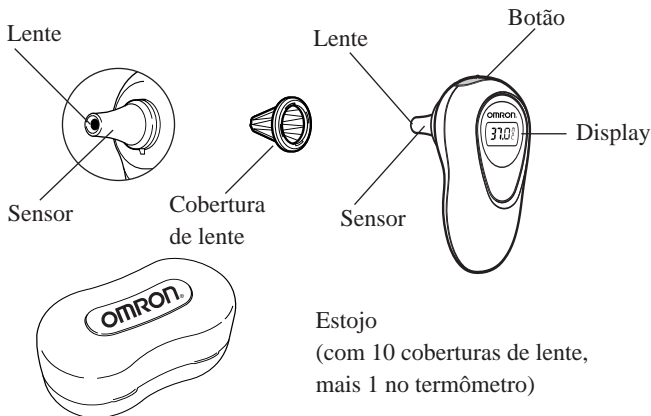

## CONVERSÃO ENTRE CENTÍGRADOS E FAHRENHEIT (°C/°F)

- O termômetro estará inicialmente configurado para Centígrados (°C)
- Siga as etapas a seguir para alterar a escala de medida de Centígrados (°C) para Fahrenheit (°F):

### Observação:

A alteração da escala de medida de "°C" para "°F" ou de "°F" para "°C" apagará os valores previamente medidos.

- 1) Certifique-se que a unidade esteja na posição off (desligado) (display em branco).
  - 2) Pressione e mantenha pressionado o botão por 3 segundos até que o "°C" pisque e que ouça um bip.
  - 3) Pressione o botão novamente, e agora o "°F" piscará.
  - 4) Após cinco (5) segundos, a unidade se desligará.
- O modo desejado estará configurado.
  - Repita o processo para reverter a escala de medida, se desejar.




# ANTES DE USAR

- O termômetro não funcionará a não ser que uma cobertura de lente seja aplicada corretamente.
- Para uso higiênico, aplique uma cobertura de lente a cada utilização.


## COMO SUBSTITUIR A COBERTURA DE LENTE

Use coberturas de lentes Omron® (modelo MC-505LC)

1) Remova a cobertura de lente.

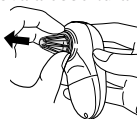

2) Aplique uma cobertura de lente nova.

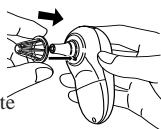

Insira a cobertura de lente até ouvir um clique.

## INSTRUÇÕES DE USO E PARA A MEMÓRIA

(1) Pressione o botão para ligar (O visor se iluminará por 2 segundos).

### Recurso de memória:

(2) A medição anterior será exibida no display (memória). Para a segunda medida e as posteriores, o valor medido é exibido com o símbolo "M" (memória).

**Observação:** Quando a unidade é usada pela primeira vez, o símbolo "M" não será exibido.

(3) Quando o símbolo "°F" ou "°C" piscar – insira a lente no ouvido. Puxe suavemente o lóbulo da orelha para trás antes da inserção para obter os melhores resultados. A tração do lóbulo da orelha proporciona uma linha direta até o tímpano, maximizando a precisão do resultado.

(4) Ouça o bip de "pronto" (1 bip); e um símbolo "O" aparecerá indicando a leitura. O ângulo está correto; pronto para a medição.

(5) Pressione o botão novamente (com a unidade no ouvido) e 4 bips indicam que a medição está concluída.

(6) Remova o sensor do ouvido.

(7) Descarte a cobertura de lente já usada, e substitua-a por uma nova, para que a unidade esteja pronta para uso novamente.

(8) Se houver necessidade de repetir a medição, espere até que "°F" ou "°C" pisque.

### Observação:

- É possível medir consecutivamente até três vezes. Se houver necessidade de maior número de medições, aguarde dez minutos, e então execute a medição novamente (isso ocorre porque a medição poderá ser imprecisa por causa do aquecimento da sonda pelo calor do corpo).

- O termômetro se desligará automaticamente aproximadamente 1 minuto após uma medição de temperatura. Não há botão para desligar a energia manualmente.


# CUIDADOS E MANUTENÇÃO

## • Como limpar a unidade

- Limpe a carcaça da unidade com um pano macio e seco, ou com álcool comum.
- Quando estiver suja, limpe a lente apenas com um pano macio e seco ou com um cotonete.
- Não limpe nenhuma parte da unidade com detergente, ou benzina.
- Não coloque na água.

## • Como guardar o termômetro


- Guarde o termômetro no estojo após instalar uma cobertura de lente para proteger a lente.
- Guarde o termômetro em um local onde esteja fora do alcance de raios solares diretos, livre de quaisquer níveis extremos de temperatura ou umidade e onde não possa ser afetado por vibrações, poeira ou choques mecânicos.

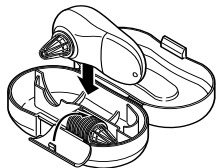

# SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

- (1) Use uma bateria de lítio CR2032.
- (2) Remova o parafuso e a capa da bateria.
- (3) Remova a bateria antiga. Não use uma chave de fenda ou alicates metálicos para remover a bateria.
- (4) Coloque a bateria nova com o sinal de positivo (+) para cima.
- (5) Recoloque a capa da bateria e aperte o parafuso.

**Observação:** O descarte de qualquer bateria usada deve ser feito de acordo com os regulamentos ambientais locais em vigor

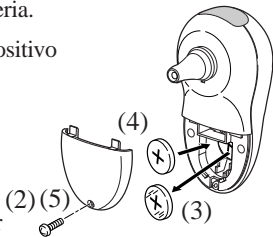
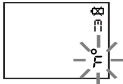


# ESPECIFICAÇÕES

Nome:	Omron® Mini Instant Ear Thermometer
Modelo:	MC-510INT
Fonte de alimentação:	3 Volts CC (bateria de lítio CR2032)
Duração da bateria:	Aproximadamente 5000 medições
Sensor:	Thermopile
Indicação de temperatura:	Em 4 dígitos, a cada 0.1°F ou °C
Precisão:	93.2 ~ 96.7°F (34.0 ~ 35.9°C): ±0.5°F (±0.3°C) 96.8 ~ 102.2°F (36.0 ~ 39.0°C): ±0.4°F (±0.2°C) 102.3 ~ 108.0°F (39.1 ~ 42.2°C): ±0.5°F (±0.3°C)
Faixa de medição:	93.2 até 108°F (34 até 42.2°C)
Peso:	Approx. 1.8 onças (50 g) (incluindo a bateria)
Temperatura/umidade de operação:	Temperatura ambiente: 50 até 104°F (10 até 40°C) Umidade relativa: 30 a 85%
Temperatura / humedade para armazenamento:	Temperatura ambiente; -20 a 60 °C (-4 a 140 °F) Humedade relativa; 10 to 95%
Memória:	Exibe a última medição
Acessórios:	Estojo, manual de instruções, coberturas de lente, (11 no total; 10 peças no estojo, mais 1 na unidade)
Opções:	Cobertura de lente usando a série modelo Omron MC-505LCINT

As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.

# SOLUÇÃO DE PROBLEMAS TÍTULO

Display	Significado	Ação
Nada é exibido mesmo após ligar a unidade.	Bateria sem carga.	Substitua a bateria.
	As polaridades da bateria (+ e -) estão erradas.	Recoloque a bateria com as polaridades corretas.
"°F" ou "°C" pisca, mas o símbolo "0" NÃO é exibido".	A cobertura de lente pode estar suja.	Substitua a cobertura de lente por uma nova.
	A lente pode estar suja.	Limpe a lente com um cotonete.
	O tímpano pode estar bloqueado com cera.	Remova a cera do ouvido do com um cotonete.
 <p>O símbolo "0 0" é exibido.</p>	A unidade está operando sob temperatura ambiente elevada, onde procedimentos especiais de operação são necessários.	Coloque a unidade no ouvido e aguarde dois segundos. Pressione o botão e aguarde 4 bips. Remova do ouvido e verifique o resultado.
 <p>Após todos os símbolos no display se iluminarem, um "—" é exibido. "☒".</p>	Pilha com pouca carga.	Substitua a pilha.
A luz do visor não se ilumina	Pilha com pouca carga.	Substitua a pilha.

# SOLUÇÃO DE PROBLEMAS TÍTULO

Display	Significado	Ação
	A cobertura de lente não está instalada no sensor.	Instale a cobertura de lente e então execute a medição.
	A temperatura da unidade está instável.	Certifique-se que a unidade seja mantida à temperatura ambiente onde a temperatura será medida. Permita 30 minutos para estabilização antes de usar.
	A temperatura da unidade está a 50° F (10°C) (ou abaixo), o que está fora da temperatura de operação.	
	A temperatura da unidade está a 104° F (40°C) (ou acima), o que está fora da temperatura de operação.	Margem Normal: (10 °C a 40 °C) (50 °F a 104 °F)
	Pode exigir assistência técnica.	Ligue a unidade novamente. Se "Er.1" for exibido novamente, a unidade pode precisar de assistência técnica. Ligue para o Departamento de Assistência Técnica.
	A temperatura medida estava acima da faixa do termômetro.	-O sensor pode não estar posicionado adequadamente no ouvido. O sensor deve estar bem encaixado na abertura do ouvido.
	A temperatura medida estava abaixo da faixa do termômetro.	-Certifique-se que a cobertura da lente esteja limpa e que o canal auricular não esteja bloqueado com cera.

# ALERTA

- Este termômetro destina-se apenas para uso em ouvidos humanos.
- Use somente as coberturas de lente apropriadas para esta finalidade específica.
- Para assegurar higiene adequada, **NÃO** compartilhe as coberturas de lente.
- Substitua as coberturas de lente quando forem afetadas pela cera de ouvido ou por outros fluidos corpóreos.
- Manipule a lente com cuidado. O manuseio incorreto pode causar leituras incorretas de temperatura.
- Mantenha a unidade fora do alcance de crianças.
- Use a unidade à temperatura ambiente. Temperaturas ambientais extremas podem afetar a precisão.
- Armazene a unidade à temperatura ambiente sempre que possível. Mantenha o termômetro à temperatura ambiente por ao menos 30 minutos antes do uso.
- Remova a unidade se houver dor durante seu uso.
- **NÃO** use em caso de infecção no ouvido.
- **NÃO** use logo após nadar ou banhar-se, pois isso pode causar danos ao tecido do ouvido, além de afetar a precisão da temperatura.
- **NÃO** use perto de um telefone portátil.
- **NÃO** desmonte, conserte, ou substitua peças da unidade em nenhuma hipótese.
- **NÃO** molhe a unidade ou despeje líquidos de qualquer tipo em qualquer parte da unidade.

## **GARANTIA LIMITADA DE 2 ANOS**

Garantimos que seu Analisador de Omron® Mini Instant Ear Thermometer estará isento de defeitos de fabricação pelo período de 2 anos, sob condições normais de uso.

Esta garantia se estende apenas ao consumidor inicial. Se algum reparo for necessário dentro do prazo de garantia por favor contatar o distribuidor autorizador neste país.

A garantia acima é completa e exclusiva. A parte que proporciona a garantia exonera-se de qualquer responsabilidade por danos de qualquer natureza, sejam incidentais, especiais, ou de consequência.

Quaisquer garantias implícitas originando-se da lei serão limitadas em sua duração ao prazo desta garantia. (Alguns estados não permitem a limitação do prazo de duração de uma garantia implícita, portanto, a limitação acima pode não se aplicar a você.)

Esta garantia proporciona direitos legais a você, e você pode ter outros direitos, que variam de estado para estado ou país para país.

# GUIA DE CONSULTA RÁPIDA

- Pressione o botão

Oprimindo o botão faz iluminar a luz do visor por 2 segundos para ver o resultado rapidamente

- Insira no ouvido
- Ouça 1 Bip
- Pressione o botão novamente
  - aguarde 4 Bips
- Remova do ouvido – verifique a leitura
- Aguarde 10 minutos antes da 4a medição

Fabricado por:

**OMRON HEALTHCARE, INC.**

300 Lakeview Parkway

Vernon Hills, Illinois 60061

USA

[www.omronhealthcare.com](http://www.omronhealthcare.com)

510INTINST Rev A